



MANUALE UTENTE



Indice

1	Introduzione a Speaky Mobile	4
2	Contenuto della Confezione	5
3	Installazione di Speaky Mobile per il primo utilizzo	6
4	Spiegazione Tasti e Gestì	6
5	Menù Principale	9
5.1	Cosa posso fare con i gesti	10
6	Comandi utili	11
7	Avviare un'applicazione di Speaky Mobile	13
8	Le Applicazioni e le funzionalità disponibili	13
8.1	Chiamate e Messaggi	13
8.1.1	Cosa posso fare con i gesti	16
8.2	Notizie da Internet	17
8.2.1	Cosa posso fare con i gesti	17
8.3	Enciclopedia	18
8.3.1	Cosa posso fare con i gesti	18
8.4	Audiolibri	19
8.4.1	Cosa posso fare con i gesti	19
8.5	ChatBot	20
8.6	Radio	21
8.6.1	Cosa posso fare con i gesti	21
8.7	Orologio	22
8.7.1	Cosa posso fare con i gesti	23

8.8	Meteo	23
8.9	Contapassi	24
9	Lettore App	25
9.1	WhatsApp	31
9.2	Lookout – Riconoscimento Testo e Oggetti.....	32
9.3	Google Play Store	33
9.4	Gmail.....	34
9.5	YouTube.....	35
9.6	Maps	36
9.7	Traduttore	36
9.8	Riconoscimento Colori.....	37
10	Aggiornamenti	37
11	Assistenza Tecnica	37






1 INTRODUZIONE A SPEAKY MOBILE

Speaky Mobile è un Telefono facile da usare tramite la voce, dedicato ai non vedenti e ipovedenti, e a tutte le persone prive di conoscenze informatiche.

L'utente toccando con due dita lo schermo può dare comandi vocali ed interagire con tutte le funzioni e applicazioni del telefono.

2 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

<p>Smartphone *</p>	
<p>Alimentatore e Cavo USB-C</p>	
<p>Auricolari</p>	

* Il telefono proposto attualmente è un Motorola G14. Il modello e le caratteristiche sono soggetti a variazioni

3 INSTALLAZIONE DI SPEAKY MOBILE PER IL PRIMO UTILIZZO

Aprire la confezione ed estrarre il Telefono.

Collegarlo al caricatore fino al raggiungimento del 100% di carica.

Inserire la scheda SIM, seguendo le istruzioni presenti sul manuale utente del telefono.


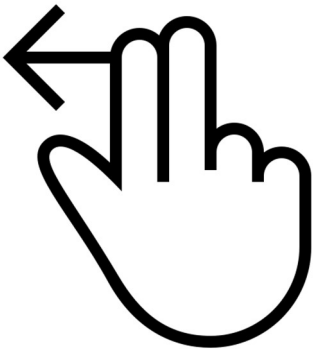

4 SPIEGAZIONE TASTI E GESTI

Di seguito una spiegazione dei tasti e dei componenti del telefono:



Figura 1: foto del telefono con etichette e indicazioni delle posizioni fisiche per pulsanti, alloggiamento scheda sim, microfoni, connessioni jack audio e altoparlante.

Le funzionalità del telefono vengono fruite utilizzando i seguenti gesti da eseguire sullo schermo:

<p>Tocco a due dita: attiva il microfono per i comandi vocali.</p>	 A stylized line drawing of a hand with the index and middle fingers touching, representing a two-finger tap gesture.
<p>Scorrere con due dita verso sinistra: torna indietro.</p>	 A stylized line drawing of a hand with the index and middle fingers touching, and a black arrow pointing to the left, representing a two-finger leftward swipe gesture.
<p>Scorrere con un solo dito verso sinistra/destra: naviga tra gli elementi di una lista (ad esempio la lista dei contatti).</p>	 Two stylized line drawings of a hand with the index finger pointing. The left drawing has a black arrow pointing to the left above the hand, and the right drawing has a black arrow pointing to the right above the hand, representing single-finger left and right swipes.

<p>Scorrere con un solo dito verso l'alto/il basso: naviga tra le funzionalità principali dell'applicazione (ad esempio Contatti, Telefono, Chiamate Recenti e Messaggi).</p>	
<p>Doppio tocco a un solo dito: selezione di un elemento di una lista.</p>	
<p>Agitare il telefono: ritorno al menù principale, ad esempio può essere eseguito dopo l'utilizzo dell'assistente vocale Google.</p>	

5 MENÙ PRINCIPALE

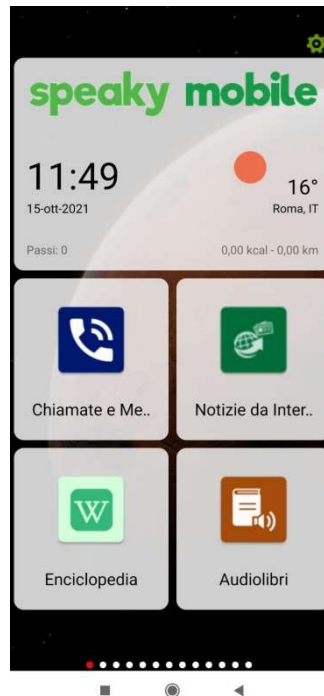


Figura 2: foto della schermata del menù principale di speaky mobile

Il menù principale è la prima schermata che si presenta all'utente all'avvio di Speaky Mobile, racchiude tutte le applicazioni disponibili, oltre ad alcune informazioni generali come data, ora e meteo.

Nel menù principale è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- **Che tempo fa:** Permette di conoscere il meteo corrente.
- **Passi:** Permette di conoscere i passi fatti nel giorno corrente.

- **Contatti:** Permette di accedere direttamente ai contatti.
- **Messaggi:** Permette di accedere direttamente ai messaggi.
- **Menù di Spegnimento:** Permette di spegnere o riavviare il telefono. È possibile spegnere il telefono anche tenendo premuto il tasto di accensione per qualche secondo.
- **Impostazioni Rapide:** Permette di accedere alle impostazioni rapide del telefono.
- **Connessione Wi-Fi:** permette di inserire la password del wi-fi a cui collegarsi.
- **Invia un messaggio all'assistenza:** permette di inviare un messaggio all'assistenza tecnica di Speaky Mobile.
- **Avvisi da Speaky Mobile:** permette di leggere gli avvisi inviati dall'assistenza di Speaky Mobile. L'arrivo di nuovi avvisi viene segnalato nel menù principale.

5.1 COSA POSSO FARE CON I GESTI

- **Scorrimento con un solo dito a destra/sinistra:** naviga tra le applicazioni.

- **Scorrimento con un solo dito in alto:** seleziona le impostazioni rapide.
- **Scorrimento con un solo dito in basso:** seleziona il menù di spegnimento.
- **Doppio tocco a un solo dito:** Avvia l'applicazione evidenziata o pronunciata in quel momento.

6 COMANDI UTILI

Il comando vocale **Aiuto** è sicuramente il più utile di Speaky Mobile. Utilizzabile in ogni momento durante l'utilizzo del telefono. Elenca tutti i comandi vocali che possono essere pronunciati in un determinato momento durante l'uso dell'applicazione.

Pronunciare **AIUTO**, quando ci si trova nel menù principale, permetterà di conoscere anche i comandi generali, utilizzabili in qualsiasi momento durante l'uso del telefono.

Di seguito un breve elenco di comandi utili:

- **Volume a + NUMERO:** Porta il volume del telefono al valore richiesto. Il NUMERO può essere un valore da 1 a 10 (es. volume a 10, volume al massimo, volume a metà, volume a 7).

- **Chiudi:** Chiude l'applicazione attiva e torna al menù principale.
- **Ripeti:** Ripete l'ultimo messaggio erogato da Speaky Mobile.
- **Indietro:** Torna indietro di un passo nel dialogo con Speaky Mobile.
- **Velocità della voce a + NUMERO:** Modifica la velocità della voce. Ad esempio “*velocità della voce a 7*”
- **Metti un timer di + TEMPO:** Imposta un timer, ad esempio “*metti un timer di 5 minuti*”.
- **Batteria:** Indica il livello corrente della batteria.
- **Segnale:** Indica il livello corrente del segnale telefonico.
- **Connessione:** Dà informazioni sulla connessione ad Internet.
- **Che giorno è oggi:** pronuncia la data odierna.
- **Che ore sono:** pronuncia l'ora corrente.
- **Notifiche:** Elenca le notifiche presenti nel telefono.
- **Notifica + NUMERO:** Seleziona una notifica.
- **Cancella Notifica:** Cancella la notifica selezionata.
- **Apri Notifica:** Apre la notifica selezionata.
- **Cancella tutte le notifiche:** elimina tutte le notifiche arrivate ma non cancella le informazioni corrispondenti.

7 AVVIARE UN'APPLICAZIONE DI SPEAKY MOBILE

Per avviare un'applicazione è sufficiente toccare lo schermo con due dita e pronunciare il nome dell'applicazione dopo aver sentito il segnale acustico.

Ogni volta che riceve un comando vocale, Speaky lo esegue e comunica all'utente cosa può fare per continuare ad usare le funzionalità in maniera tale da assistere l'utente passo dopo passo.

8 LE APPLICAZIONI E LE FUNZIONALITÀ DISPONIBILI

8.1 CHIAMATE E MESSAGGI

Applicazione che permette di gestire le chiamate e i messaggi.

Le funzionalità presenti sono:

- Gestione dei **contatti**: creazione di un nuovo contatto, modifica ed eliminazione.
- Gestione della **tastiera del telefono**: inserimento di un nuovo numero da chiamare oppure per inviare un nuovo messaggio.
- Gestione delle **chiamate recenti**, suddivise in chiamate ricevute, chiamate effettuate e chiamate perse. Possibilità di eliminare e di aggiungere un numero ai propri contatti.
- Gestione dei **messaggi**: selezione della conversazione relativa ad un contatto, possibilità di eliminare una conversazione e rispondere ad un messaggio.

In ogni momento durante l'utilizzo di Speaky Mobile, è possibile effettuare una chiamata ad un contatto, oppure inviare un messaggio ad un contatto.

Si può chiamare un contatto dicendo ad esempio:

- *Chiama Mario Rossi*
- *Chiama Mario Rossi Cellulare*

In caso di contatti con lo stesso nome, oppure di più numeri di telefono per lo stesso contatto, il sistema elencherà tutti i numeri di telefono disponibili. È possibile quindi chiamare uno specifico dicendo:

- *Chiama Telefono 1*

È possibile, inoltre, avviare una chiamata in vivavoce:

- *Chiama Mario Rossi in vivavoce*

Si può inviare un messaggio ad un contatto dicendo ad esempio:

- *Invia Messaggio a Mario Rossi*

Oppure nel caso di più numeri di telefono:

- *Invia Messaggio al Telefono 1*

Puoi anche chiamare o inviare un messaggio dicendo il numero o una parte di esso, ad esempio:

- *Chiama il 333 4747474*
- *Invia Messaggio al 333 4747474*

Nel caso di una chiamata in arrivo, è possibile rispondere o rifiutare la chiamata, tramite i comandi *rispondi*, *rispondi in vivavoce* o *rifiuta*, oppure scorrendo con il dito sullo schermo verso destra, per rispondere, o verso sinistra per rifiutare.

Quando si è in chiamata, puoi terminarla scorrendo con il dito sullo schermo verso sinistra oppure dare il comando *termina chiamata*.

Puoi anche premere un numero della tastiera in chiamata, dicendo il numero corrispondente, oppure scorrendo con un dito verso l'alto o verso il basso per selezionare il numero, e doppio tocco con un dito per premerlo.

DI SEGUITO UN BREVE ELENCO DEI COMANDI DISPONIBILI:

- Contatti
- Crea nuovo contatto
- Telefono
- Chiamate recenti
- Messaggi
- Nuovo Messaggio
- Rispondi
- Rifiuta

8.1.1 Cosa posso fare con i gesti

- **Scorrere con un solo dito in alto/in basso:** naviga tra le funzioni di contatti, telefono, chiamate recenti e messaggi.
- **Scorrere con un solo dito a destra/sinistra:** naviga negli elementi delle liste dei contatti, dei numeri di telefono di un contatto, delle chiamate recenti e dei messaggi. Oppure naviga la tastiera nell'inserimento di un numero.
- **Doppio tocco a un solo dito:** Apre un contatto o i messaggi di un dato contatto, avvia la chiamata ad un numero di un contatto o ad una chiamata recente, inserisce un numero da tastiera.

Durante una chiamata i gesti disponibili sono:

- **Scorrere con un solo dito a destra:** risponde alla chiamata.
- **Scorrere con un solo dito a sinistra:** rifiuta la chiamata/riaggancia.
- **Scorrere con un solo dito in alto:** risponde alla chiamata in vivavoce. Oppure seleziona il numero precedente della tastiera.
- **Scorrere con un solo dito in basso:** Conoscere il chiamante in una chiamata in arrivo. Oppure seleziona il numero precedente della tastiera.
- **Doppio tocco a un solo dito:** Preme il numero della tastiera selezionato.

8.2 NOTIZIE DA INTERNET

Permette di leggere i contenuti da internet, quali news, ricette, oroscopo, e molto altro, selezionando il nome della fonte e le relative categorie.

DI SEGUITO UN BREVE ELENCO DEI COMANDI DISPONIBILI:

- Elenco fonti
- Elenco categorie
- Elenco argomenti
- Elenco articoli
- Leggi
- Preferiti
- Cronologia

8.2.1 Cosa posso fare con i gesti

- **Scorrere con un solo dito in alto/in basso:** naviga tra le sezioni, preferiti, cronologia e cerca.
- **Scorrere con un solo dito a destra/sinistra:** naviga tra le fonti, le categorie, gli interessi e gli articoli.
- **Doppio tocco a un solo dito:** Seleziona una fonte, categoria, interesse; inizia la lettura di un articolo.

8.3 ENCICLOPEDIA

Permette di effettuare ricerche all'interno di Wikipedia, l'enciclopedia online, e leggere il contenuto delle pagine generate dalla ricerca. È possibile salvare le pagine ricercate nei preferiti.

DI SEGUITO UN BREVE ELENCO DEI COMANDI DISPONIBILI:

- Nuova Ricerca
- Definizione
- Indice
- Altri Significati
- Voci Correlate
- Preferiti
- Cronologia

8.3.1 Cosa posso fare con i gesti

- **Scorrere con un solo dito in alto/in basso:** naviga tra le funzioni di lettura pagina, preferiti e cronologia.
- **Scorrere con un solo dito a destra/sinistra:** naviga tra gli elementi dell'indice di una pagina, e tra le pagine nei preferiti e nella cronologia.
- **Doppio tocco a un solo dito:** Seleziona un capitolo, oppure una pagina nei preferiti o nella cronologia.

8.4 AUDIOLIBRI

Applicazione che permette di scaricare e riprodurre tutti gli audiolibri presenti online nella Biblioteca del Libro Parlato di Brescia della UICI. Il modulo effettua il download del libro e poi lo rende disponibile per l'ascolto.

DI SEGUITO UN BREVE ELENCO DEI COMANDI DISPONIBILI:

- Titolo
- Avvia Ricerca
- Libri in Scaricamento
- La mia biblioteca
- Apri il libro
- Leggi dall'inizio
- Riprendi la lettura

8.4.1 Cosa posso fare con i gesti

- **Scorrere con un solo dito in alto/in basso:** naviga tra le funzioni di ricerca, download, mia biblioteca e lettura.
- **Scorrere con un solo dito a destra/sinistra:** naviga tra i risultati di una ricerca, i libri nella mia biblioteca, e seleziona il capitolo precedente o successivo di un libro in ascolto.
- **Doppio tocco a un solo dito:** Apre un libro in lettura, mette in pausa/riprende la lettura di un libro in ascolto.

8.5 CHATBOT

Il tuo assistente intelligente che risponde a qualsiasi domanda, e ti tiene compagnia ogni volta che vuoi.

Utilizza l'intelligenza artificiale di ChatGPT, creata da OpenAI, per trovare le informazioni che chiedi.

Può ricordare ciò che dici durante la conversazione, e puoi correggere quello che dice, dicendo la tua versione delle cose.

Ha però una conoscenza limitata del mondo e degli eventi dopo il 2021.

Ecco alcuni esempi di argomenti comuni su cui può aiutarti.

Informazioni generali: puoi chiedere di fornirti fatti, definizioni o spiegazioni su qualsiasi argomento di tuo interesse.

Consigli e suggerimenti: se hai bisogno di consigli su argomenti come relazioni, carriera, salute, hobby o qualsiasi altro ambito.

Curiosità e domande insolite: può affrontare argomenti interessanti e inusuali.

News e attualità: può fornirti informazioni e aggiornamenti su eventi, notizie, sviluppi scientifici, sportivi, politici o di intrattenimento.

Trivia e giochi: se desideri giocare a un quiz o risolvere enigmi.

DI SEGUITO UN BREVE ELENCO DEI COMANDI DISPONIBILI:

- Ultima Risposta
- Stato Abbonamento

8.6 RADIO

Applicazione che permette di ascoltare centinaia di web radio nazionali, salvarle tra i preferiti e scorrere la cronologia.

DI SEGUITO UN BREVE ELENCO DEI COMANDI DISPONIBILI:

- Elenco Stazioni
- Elenco Generi
- Elenco Località
- Preferiti
- Cronologia
- Play
- Pausa

8.6.1 Cosa posso fare con i gesti

- **Scorrere con un solo dito in alto/in basso:** naviga tra la lista completa delle stazioni, i preferiti e la cronologia.

- **Scorrere con un solo dito a destra/sinistra:** naviga tra le stazioni radio.
- **Doppio tocco a un solo dito:** Avvia o mette in pausa la radio selezionata.

8.7 OROLOGIO

Applicazione che permette:

- La gestione delle sveglie.
- La gestione del timer.
- La gestione dell'agenda, inserendo nuovi appuntamenti.

Il telefono avvertirà quando suonerà una sveglia, quando scade un timer e quando sta per scadere un appuntamento inserito.

DI SEGUITO UN BREVE ELENCO DEI COMANDI DISPONIBILI:

- Sveglia
- Nuova Sveglia
- Timer
- Agenda
- Nuovo Appuntamento
- Prossimi Appuntamenti

8.7.1 Cosa posso fare con i gesti

- **Scorrere con un solo dito in alto/in basso:** naviga tra le funzioni di sveglia, timer, e agenda.
- **Scorrere con un solo dito a destra/sinistra:** seleziona una data in agenda.

8.8 METEO

Applicazione che permette di conoscere il meteo per il luogo in cui ci si trova. È possibile conoscere il meteo del giorno corrente, diviso per ore, e il meteo fino ai prossimi sette giorni.

DI SEGUITO UN BREVE ELENCO DEI COMANDI DISPONIBILI:

- Oggi
- Domani
- Lunedì
- Alle ore + ORARIO (es. Alle ore 12:00)

8.9 CONTAPASSI

Applicazione che permette di conoscere il numero di passi effettuati nell'ultima settimana a partire dal giorno corrente.

DI SEGUITO UN BREVE ELENCO DEI COMANDI DISPONIBILI:

- Oggi
- Ieri
- *Giorno della settimana es. Lunedì*

9 LETTORE APP





Applicazione, in fase di brevettazione internazionale, che permette di utilizzare tutte le altre applicazioni, oltre a quelle sopra descritte, installate sul telefono.





All'avvio di un'applicazione, Speaky mobile, avverte che l'applicazione verrà gestita tramite il Lettore App. da questo momento sarà possibile utilizzare l'applicazione sia tramite gesti che tramite comandi vocali.


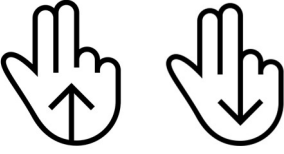



Il Lettore App elenca tutti gli elementi visibili a schermo che possono essere selezionati tramite voce o gesti.


È possibile effettuare le seguenti operazioni:

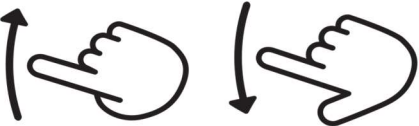
Conoscere gli elementi della schermata corrente, tramite il comando vocale <i>lista elementi</i> .	
Conoscere gli elementi cliccabili della schermata corrente, tramite il comando vocale <i>lista elementi cliccabili</i> .	

<p>Conoscere gli elementi scrivibili della schermata corrente, tramite il comando <i>lista elementi scrivibili</i>.</p>	
<p>Selezionare un elemento, tramite i comandi <i>elemento precedente</i>, <i>elemento successivo</i>, <i>elemento + numero</i>, <i>elemento + nome</i>.</p>	
<p>Scorrere tra gli elementi trascinando il dito sullo schermo verso sinistra o destra.</p>	
<p>Cambiare modalità di lettura, tramite i comandi <i>lettura completa</i>, <i>lettura controlli</i>, <i>lettura testo</i>, <i>lettura intestazioni</i>, <i>lettura link</i>, <i>lettura caratteri</i>, <i>lettura parole</i>, <i>lettura righe</i>.</p>	

<p>Cambiare modalità di lettura (completa, controlli, testo, intestazioni, link, carattere, parola, riga) trascinando il dito sullo schermo in alto o in basso.</p>	
<p>Cliccare un elemento, tramite i comandi vocali <i>clicca</i>, <i>clicca elemento + numero</i>, <i>clicca + nome</i>.</p>	
<p>Cliccare l'elemento corrente facendo un doppio tocco sullo schermo con un dito.</p>	
<p>Abilitare la scrittura in un elemento scrivibile (ad esempio una barra di ricerca in cui inserire il testo da cercare), tramite i comandi vocali <i>scrivi</i>, <i>scrivi + numero</i>, <i>scrivi + nome</i></p>	

<p>Abilitare la scrittura nell'elemento corrente facendo un doppio tocco sullo schermo con un dito.</p>	
<p>Scorrere le liste trascinando due dita sullo schermo verso l'alto oppure verso il basso.</p>	
<p>Scorrere una lista di elementi tramite i comandi vocali <i>vai in alto</i>, <i>vai in basso</i>.</p>	
<p>Ricarica gli elementi della pagina corrente, dicendo <i>ricarica</i>.</p>	
<p>Ricarica gli elementi della pagina corrente trascinando due dita sullo schermo verso destra.</p> <p><i>Utilizza questo comando per cercare di ricaricare la pagina dell'app che stai navigando, se non trovi l'elemento desiderato.</i></p>	

Tornare alla schermata precedente, dicendo <i>indietro</i> .	
--	---

Tornare alla schermata precedente, scorrendo due dita sullo schermo verso sinistra.	
---	---

Il sistema elencherà, se presenti, i differenti menù della schermata dell'applicazione. È possibile selezionare un menù, dicendo menù, seguito dal numero. Oppure il contenuto dell'applicazione:

- Menù 1
- Menù 2
- Contenuto dell'Applicazione
- Sezioni

Puoi anche gestire i contenuti multimediali Audio e Video tramite i seguenti comandi:

- Play
- Pausa
- Scorri Avanti
- Scorri Indietro

- Tempo Corrente
- Vai al Contenuto Multimediale

Oppure effettuare direttamente la ricerca all'interno di una app, se presente, tramite il comando *Cerca*.

In questo modo è possibile utilizzare le funzionalità come le Impostazioni del telefono e tutte le app come la Fotocamera, Gmail, Youtube, Play Store e tante altre.

È possibile, inoltre, accedere al menù di spegnimento del telefono (comando *Menù di Spegnimento* nel menù principale), in cui è possibile spegnere o riavviare il telefono dicendo *spegni* oppure *riavvia*.

Alle impostazioni rapide, in cui si possono abilitare o disabilitare alcune impostazioni del telefono, quali il wi-fi, i dati mobili, il bluetooth, ecc.

Alla connessione wi-fi, in cui si può selezionare una rete, ed inserire la password.

Alcune applicazioni sono state rese più facilmente accessibili tramite l'utilizzo del lettore app, quali WhatsApp, Lookout, Google Play Store, Gmail, YouTube, Maps, Traduttore e il Riconoscimento Colori.

9.1 WHATSAPP

Permette tramite il lettore App di gestire le conversazioni WhatsApp.

È possibile tramite comandi facilitati selezionare una conversazione, selezionare un contatto a cui inviare un messaggio, navigare tra i messaggi, rispondere ai messaggi tramite testo, emoji o messaggi vocali.

Gli altri comandi e i gesti sono quelli base del lettore App, ad esempio per scorrere la lista delle conversazioni o dei messaggi si può dire *vai in alto* oppure *vai in basso*.

DI SEGUITO UN BREVE ELENCO DEI COMANDI DISPONIBILI:

- Messaggio (numero)
- Nuova Chat
- Messaggio Precedente
- Messaggio Successivo
- Ultimo messaggio
- Rispondi
- Invia Messaggio Vocale

9.2 LOOKOUT – RICONOSCIMENTO TESTO E OGGETTI

Permette tramite il lettore App di gestire l'app Lookout di Google.

Questa app consente di attivare il riconoscimento del testo e dei documenti, esplorare l'ambiente circostante, riconoscere le banconote e riconoscere le etichette dei prodotti alimentari. Per abilitare la modalità desiderata basta pronunciare l'apposito comando vocale.

Nella modalità riconoscimento testo basta inquadrare con la fotocamera i testi e l'app leggerà il contenuto tramite la funzionalità di riconoscimento dei caratteri (OCR).

Nella modalità scansione documenti basta inquadrare con la fotocamera un documento e l'app leggerà il contenuto tramite la funzionalità di riconoscimento dei caratteri (OCR).

Nella modalità esplorazione ambiente basta inquadrare con la fotocamera qualsiasi parte dell'ambiente circostante, l'app pronuncerà gli oggetti che si stanno inquadrando.

Nella modalità riconoscimento banconote basta inquadrare con la fotocamera la banconota e l'app pronuncerà quella riconosciuta.

Infine, nella modalità etichette alimentari basta inquadrare con la fotocamera l'etichetta del prodotto e l'app pronuncerà il nome del prodotto.

DI SEGUITO UN BREVE ELENCO DEI COMANDI DISPONIBILI:

- Riconoscimento testo
- Scansione documenti
- Esplorazione ambiente
- Riconoscimento banconote
- Etichette Alimentari

9.3 GOOGLE PLAY STORE

Permette tramite il lettore App di gestire il Google Play Store.

È possibile tramite comandi vocali facilitati cercare una app, installarla, aggiornarla o disinstallarla.

Gli altri comandi e i gesti sono quelli base del lettore App, ad esempio per scorrere la lista si può dire *vai in alto* oppure *vai in basso*.

DI SEGUITO UN BREVE ELENCO DEI COMANDI DISPONIBILI:

- Cerca
 - Applicazione (numero)
 - Installa
 - Aggiorna
 - Disinstalla
 - Apri
-

9.4 GMAIL

Permette tramite il lettore App di gestire la propria casella di posta elettronica tramite l'app Gmail.

È possibile tramite comandi vocali:

- Selezionare, leggere ed eliminare le email.
- Selezionare una cartella di posta.
- Scrivere, rispondere o inoltrare una mail, selezionando i contatti salvati in rubrica.
- Cercare una mail.

Gli altri comandi e i gesti sono quelli base del lettore App, ad esempio per scorrere la lista dei messaggi si può dire *vai in alto* oppure *vai in basso*.

DI SEGUITO UN BREVE ELENCO DEI COMANDI DISPONIBILI:

- Messaggio (numero).
- Cartelle
- Cerca
- Nuovo Messaggio
- Destinatari
- Oggetto
- Testo

- Allegati
- Invia

9.5 YOUTUBE

Permette tramite il lettore App di gestire l'app YouTube.

È possibile tramite comandi vocali facilitati cercare un video, avviarlo, e gestire l'esecuzione del video.

Durante l'esecuzione di un video è possibile mandare avanti o indietro il video scorrendo con un dito in basso o in alto.

Gli altri comandi e i gesti sono quelli base del lettore App, ad esempio per scorrere la lista dei video si può dire *vai in alto* oppure *vai in basso*.

DI SEGUITO UN BREVE ELENCO DEI COMANDI DISPONIBILI:

- Cerca
- Video (numero)
- Play
- Pausa
- Salta la pubblicità

9.6 MAPS

Permette tramite il lettore App di gestire l'app Maps.

È possibile tramite comandi vocali facilitati avviare la navigazione verso un indirizzo, scegliendo tra: a piedi, in macchina o con i mezzi pubblici.

DI SEGUITO UN BREVE ELENCO DEI COMANDI DISPONIBILI:

- Portami a via Laurentina a piedi
- Vai a Via Tiburtina in macchina
- Via Nomentana con i mezzi pubblici

9.7 TRADUTTORE

Permette tramite il lettore App di gestire l'app Traduttore.

È possibile tramite comandi vocali facilitati farsi tradurre frasi in diverse lingue.

DI SEGUITO UN BREVE ELENCO DEI COMANDI DISPONIBILI:

- Traduci
- Traduci da Italiano a Inglese

9.8 RICONOSCIMENTO COLORI

Permette tramite il lettore App di gestire l'app per il riconoscimento dei colori. Una volta attivata basta inquadrare con la fotocamera qualsiasi cosa e l'app pronuncerà il colore riconosciuto.

10 AGGIORNAMENTI

Speaky Mobile si aggiorna automaticamente. L'installazione degli aggiornamenti avviene in maniera automatica tramite Google Play Store senza richiedere alcuna interazione da parte dell'utente.

Per sapere in ogni momento se ci sono nuovi aggiornamenti basta dire verifica aggiornamenti nel menù principale.

11 ASSISTENZA TECNICA

Per attivare l'assistenza basta

- chiamare il seguente numero 06 45 65 32 90,
- inviare un sms o un messaggio Whatsapp al numero 379 10 42 665,
- oppure inviare una mail all'indirizzo assistenza@mediavoice.it.

L'assistenza tecnica per Speaky Mobile viene effettuata tramite il software gratuito TeamViewer, già preinstallato sul telefono. Esso permette ai tecnici



della Mediavoice, previa autorizzazione da parte dell'utente, di accedere al telefonino tramite internet e risolvere le anomalie segnalate.

Mediavoice S.r.l.

Via Laurentina, 569 - 00143 Roma (Italy)

<https://www.mediavoice.it>

assistenza@mediavoice.it

Speaky™ è un prodotto ideato e brevettato da Mediavoice S.r.l.

Copyright © 2023 Mediavoice S.r.l. - Tutti i diritti riservati

Speaky™ è un marchio registrato da Mediavoice S.r.l.

Tutti gli altri marchi e prodotti indicati appartengono ai rispettivi proprietari.